



Notice de montage

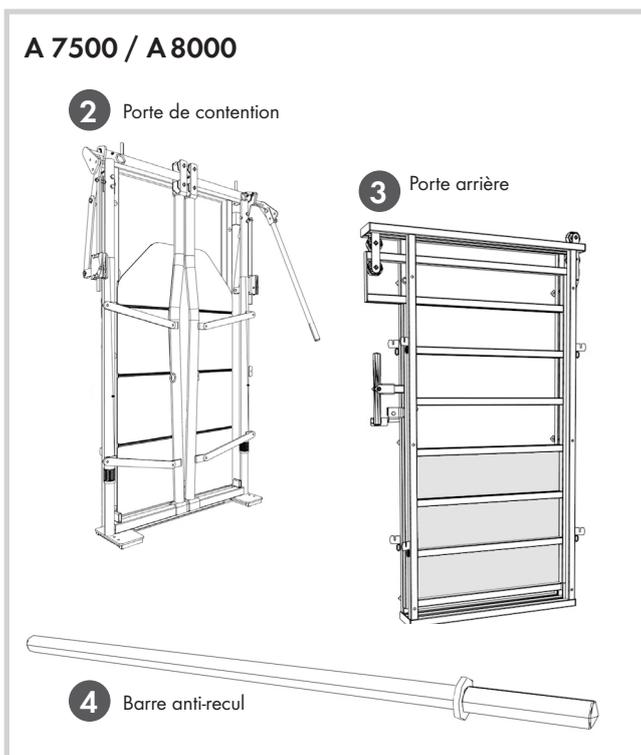


Ref. 302750 Cadre d'encolure A7500
Ref. 302800 Cadre d'encolure A8000

Contenu de la livraison :

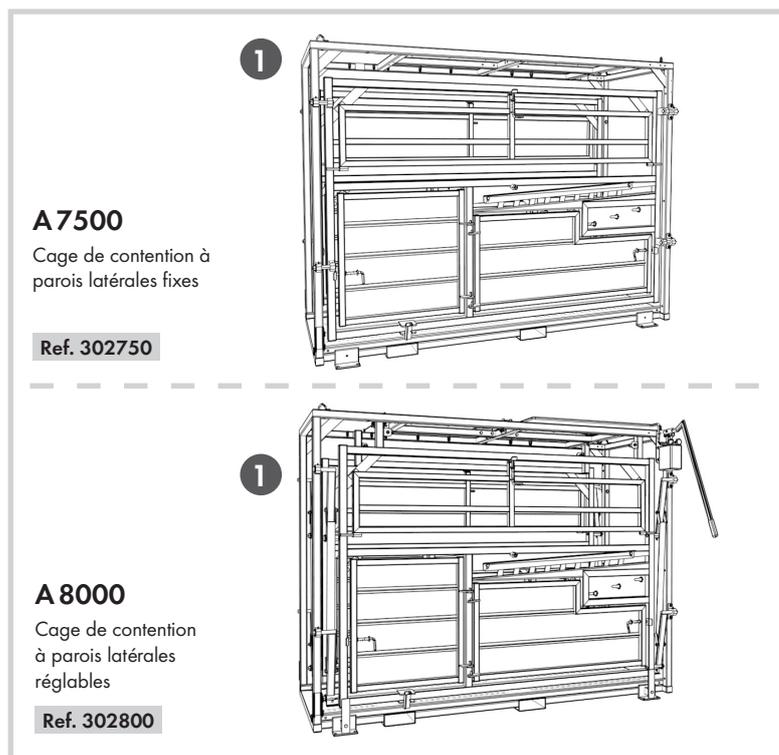

Options :

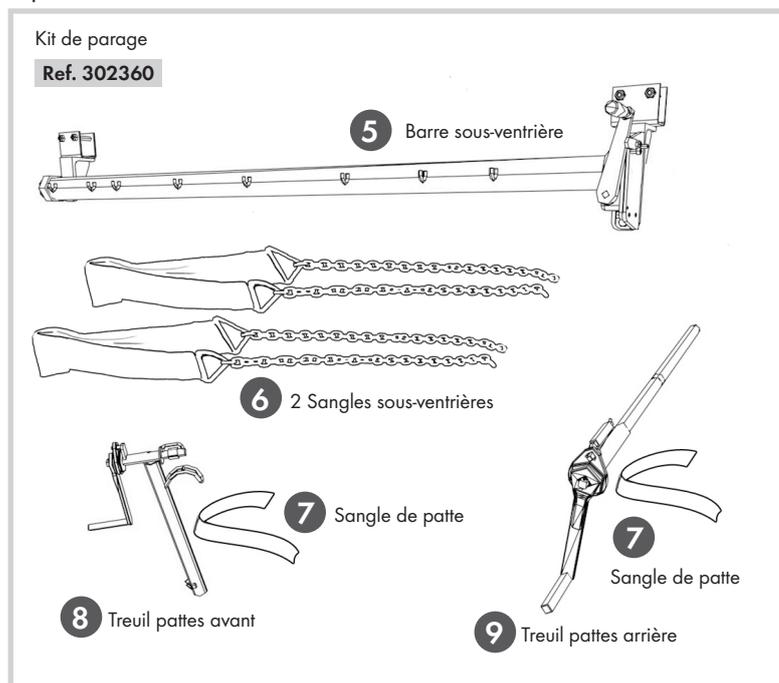


Important


- Une manipulation tranquille facilite le traitement des animaux. Attirer et ménager les bêtes afin d'éviter toute bousculade.
- Utiliser un équipement de protection, comme des gants, des chaussures de sécurité mais aussi des lunettes adaptées lors de l'utilisation d'une meuleuse d'angle.

1. Utilisation

1
Transport par fourche à palette. Déposer sur un sol plat au bout du couloir d'accès.

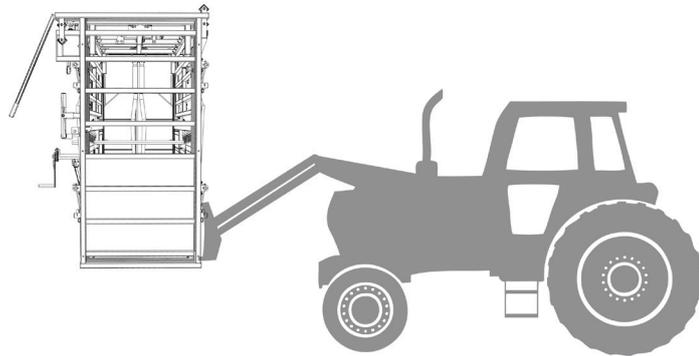


2
Pour un travail efficace en toute sécurité :
Utiliser un système de contention complet avec possibilité de regroupement des bêtes (Chapitre système de contention mobile - Catalogue général Ref.310103) et unité de parage.

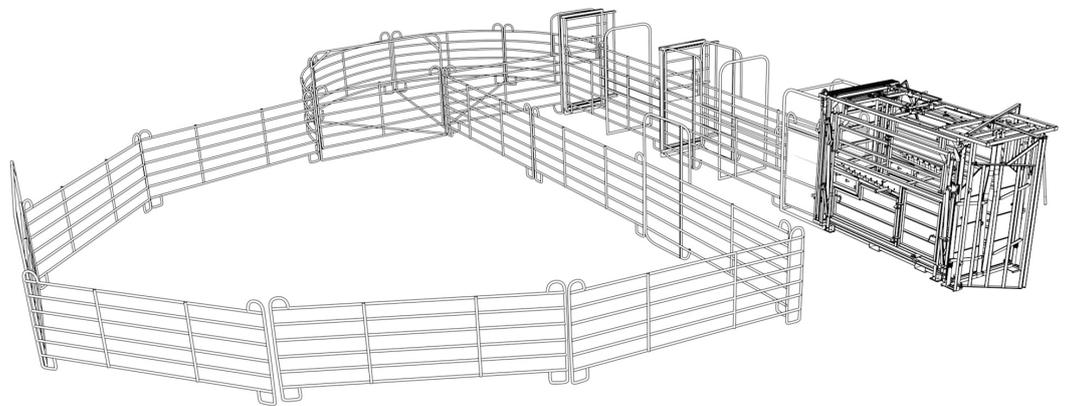


3
Fermer le panier (à l'aide du levier **12** situé derrière le dispositif de blocage **11** tout en fixant la chaîne!)


4
Faire entrer l'animal et refermer la porte **3** derrière.

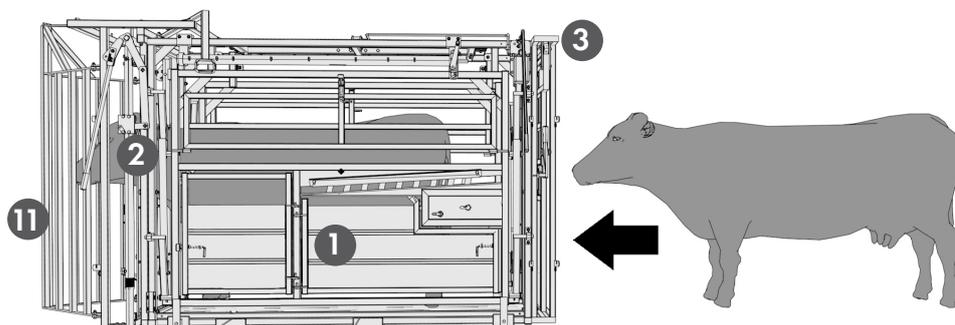



- 5**
Fixer la tête de l'animal dans le cadre à encolure réglable **2** et resserrer le système de fermeture afin que la bête ne puisse pas reculer.

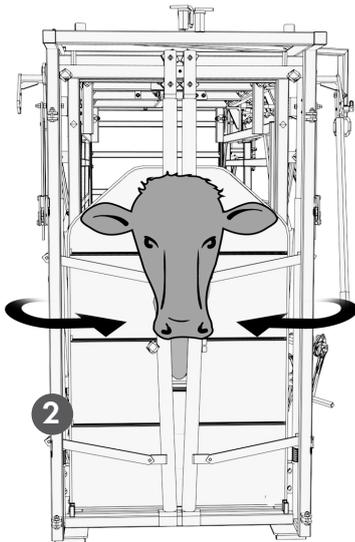

- 6**
Pour une immobilisation sécurisée de l'animal, introduire la barre anti-recul **4** à l'endroit prévu à cet effet et l'avancer autant que possible en bloquant avec la languette de sécurité.

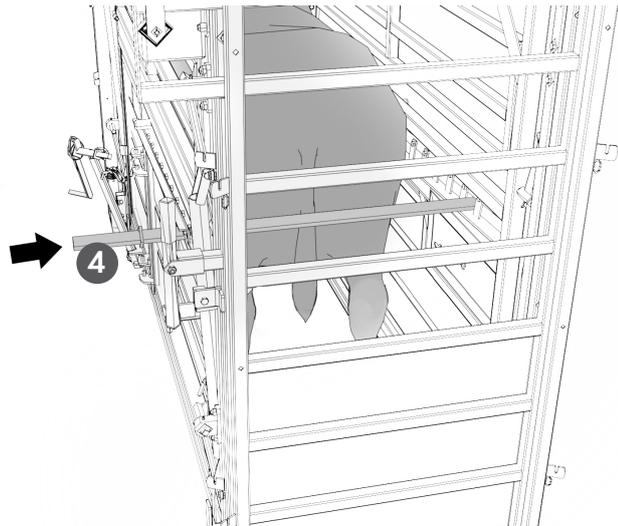


- 7**
Serrage latéral du Mod. A8000 :
Grâce au levier hydrolique.
Utiliser la soupape pour un retour à la position initiale.

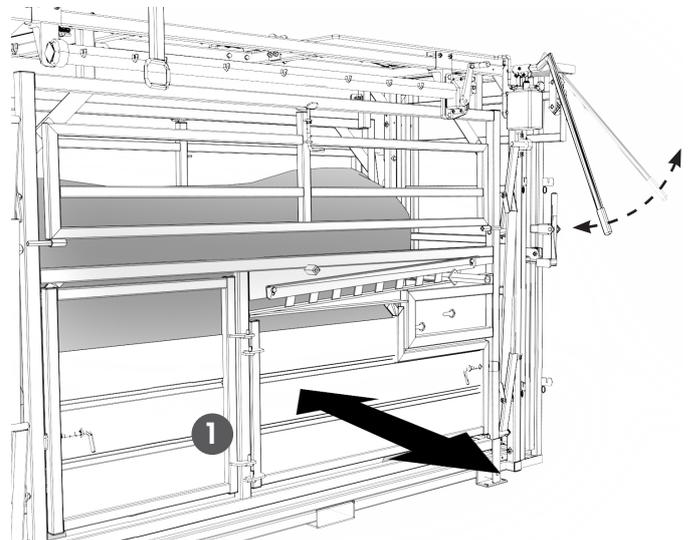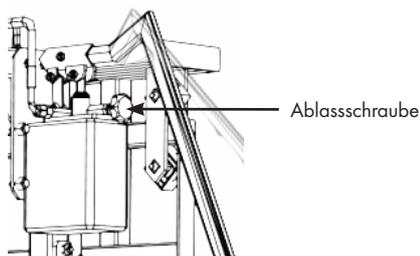

- 8**
Pour une intervention au niveau de la tête de l'animal (marques d'oreilles, anneau nasal, etc) :
Ouvrir le panier **12** **11** .
Pour tout autre traitement, accès à l'animal par les ouvertures inférieures ou l'abattant supérieur **1** .

Sortie de l'animal :

1. Retirer la barre anti-recul **4** .
2. Laisser la porte arrière **3** fermée.
3. Ouvrir le panier **12** **11** .
4. Ouvrir le cadre d'encolure **2** .

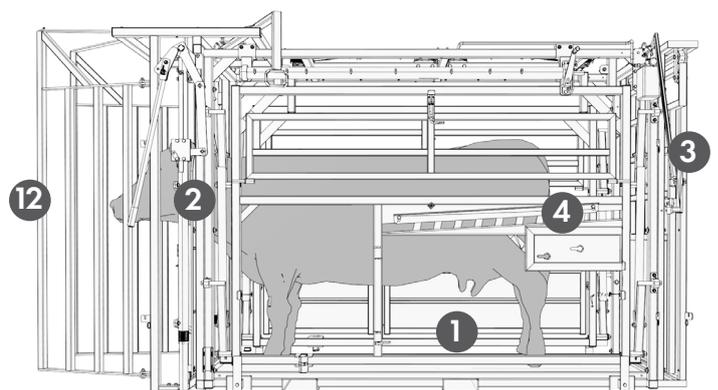


2. Utilisation du kit de parage (en option)

1 Fixation sécurisée:


- Fermer la panier **12** **11**.
- Fermer le cadre d'encolure **2**.
- Introduire la barre anti-recul **4** et la fixer.
- Régler le serrage latéral (dans le cas du A8000).

- ### 2
- Accrocher la sangle de la ventrière **6** sur le cadre.
 - Glisser la sangle sous la panse de l'animal.
 - Accrocher l'extrémité à la barre de recul **5** et tendre légèrement la sous-ventrière.

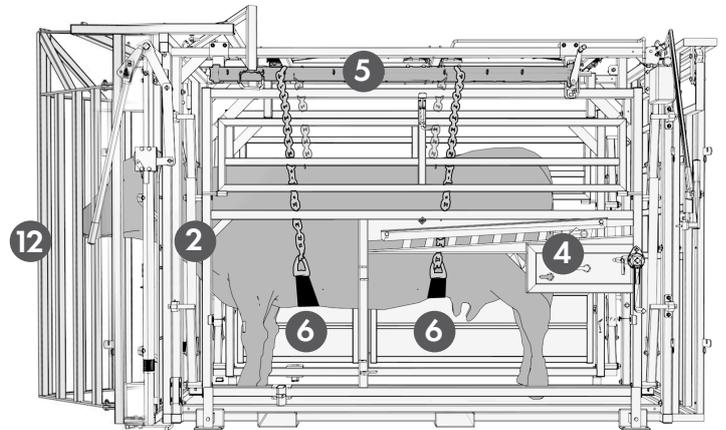


Ne pas serrer trop les sangles sous-ventrières afin de ne pas rendre l'animal anxieux.

- ### 4
- Fixer le treuil pattes avant **7** à l'aide de la goupille.
 - Avec la courroie **8** faire une boucle autour de la patte avant de l'animal, sous l'ergot et l'accrocher au treuil.
 - Hisser la patte.

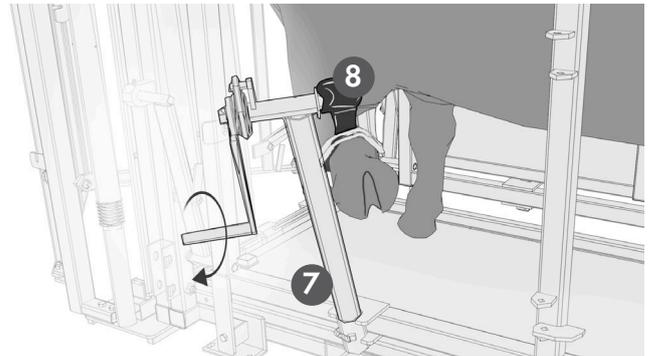

- ### 5
- Fixer le treuil pattes arrière **9** sur la porte latérale arrière à travers le trou adapté à la taille de l'animal.
 - Avec la courroie **8** faire une boucle autour de la patte arrière de l'animal, sous l'ergot et l'accrocher au treuil.
 - Hisser la patte jusqu'à ce qu'elle soit fermement maintenue contre la barre.

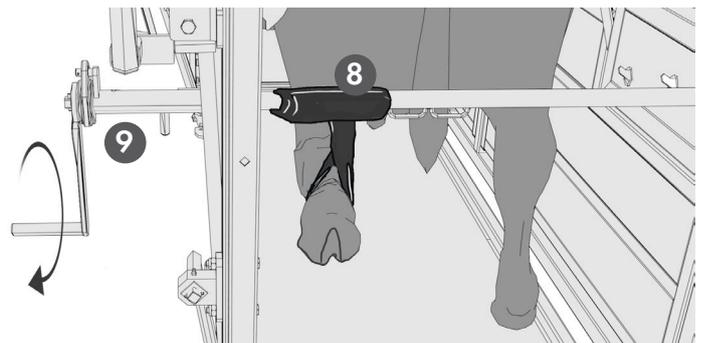

3. Entretien

- Après utilisation, enlever la cage car les animaux peuvent l'abîmer de l'extérieur.
- Nettoyer la cage minutieusement et l'entreposer dans un lieu sec.
- Huiler le graisseur régulièrement et de façon suffisante pour garantir une longue durée de vie du cadre d'encolure.
- Le cran d'arrêt doit être entretenu uniquement à l'aide d'une huile lubrifiante.